



## Instruções de Coleta:

### Metodologia: Citologia Líquida de Segunda Geração Liqui-PREP.

Material: Raspado cervical (ecto e endocervical).

Pré-requisitos:

- A coleta deverá ser feita fora do período menstrual; poderá ser realizada durante sangramento, fora do período menstrual. Abstinência sexual de no mínimo 48 horas; não ter usado ducha, lavagem ou cremes vaginais.
- Identificar o frasco com o nome da paciente.
- A Escova de Coleta não deve ser utilizada em pacientes grávidas.
- O residual da amostra é armazenado por 60 dias e pode ser utilizado para realização de Hibridização Molecular sem a necessidade de uma nova coleta.


### Passo a Passo da Coleta:

- Quando houver secreção retirar o excesso com gaze, antes de coletar a amostra.
- Posicionar as cerdas mais longas da Escova de Coleta no canal endocervical.
- As cerdas laterais irão se espalhar sobre a ectocérvice e as centrais irão penetrar no canal endocervical.
- Mantendo uma pressão suave, girar a Escova de Coleta três vezes (3x) no sentido horário.
- 100% das células coletadas são transferidas para o meio de transporte.
- Solução a base de Etanol, preserva a amostra por 60 dias a temperatura ambiente.

#### COLETAR



#### DESTACAR

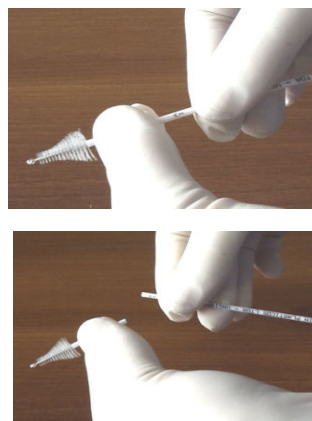

#### ENVIAR



- Destacar a ponta quebrável da Escova de Coleta na flecha indicativa e acomodar no frasco do Liqui-PREP, que deve ser previamente identificado, colocar a tampa e enviar ao laboratório juntamente com a requisição de exame devidamente preenchida.
- O ponto de quebra da Escova de Coleta foi determinado de modo a evitar o contato da mão do profissional com as cerdas da escova.